

# Apex DSP

Localizador Apical Computadorizado  
com Design Inovador.



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
http://www.septodont.com.br

**MENOR TAMANHO,  
MAIOR PRATICIDADE**



**3 ANOS DE  
GARANTIA**

#### PROPRIEDADES:

Localizador apical computadorizado de fácil operação, projetado com padrões de segurança e qualidade internacional. Apex D.S.P. com Design inovador.

#### PRECISO

- Não precisa ser calibrado.
- Cabos curtos, flexíveis, evitam interferências eletromagnéticas.

#### ECONOMIA

- Reduz a quantidade de raio X.
- Eficiente: reduz tempo de trabalho.

#### SEGURO E CONFIÁVEL

- Display com informações claras.
- Nunca registra informação atrasada.
- Microprocessador controlado.


#### IMPORTANTE

Para uma precisão maior, antes do tratamento assegure-se de que:

- Todos os canais estejam isolados um dos outros.
- O canal do dente esteja livre de tecidos.
- Você isolou os tecidos da gengiva adjacentes e todas as restaurações metálicas (de tratamentos anteriores).

#### CONECTANDO O CABO:

A) Insira o fio do terminal da lima(1) e o gancho(2) nas duas saídas do cabo. Insira o plug principal (3) na entrada do aparelho.

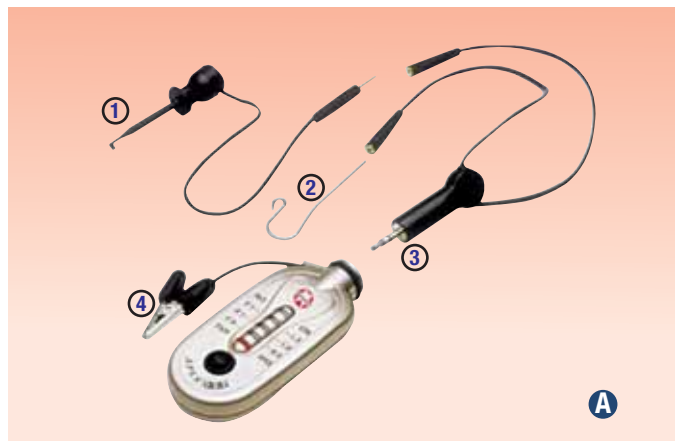

#### CONECTANDO A LIMA:



Conecte a lima no gancho( figura C) e leve a lima para entrada do canal da raiz( figura D). O Apex D.S.P. está pronto para uso.

#### OPERAÇÃO DO APARELHO:



B) Para operar o Apex D.S.P. pressione o botão preto do aparelho. No início, os LEDs irão mostrar uma certa seqüência. Após isso, o LED amarelo irá piscar, indicando que o Apex D.S.P. está no modo standby. Após atingir uma profundidade de 1,5mm, o LED amarelo ficará aceso continuamente.

- A luz vermelha acenderá quando a lima chegar ao ápice. Se passar do ápice a luz vermelha começa a piscar.

#### NOTA:

O APEX D.S.P. fornece medições precisas do canal sob todas as condições, incluindo umidade e sangramento. Você pode medir outro canal imediatamente, sem nenhuma preparação especial. Não há a necessidade de calibrar o Apex D.S.P.  
Apex D.S.P. – 3 anos de garantia.