

SEMPRE
por VOCÊ



KaVo UNIspray
O lubrificante ideal!



A MELHOR FORMA DE CONSERVAR SEUS INSTRUMENTOS SEMPRE EM ÓTIMO ESTADO.

Um único produto para todas as suas necessidades.

KaVo UNIspray é o lubrificante ideal para os seus instrumentos de alta e baixa rotação.

Além de lubrificante, possui ação detergente e bactericida. Deve ser usado sempre antes de esterilizar os instrumentos e a cada turno de trabalho, no mínimo duas vezes ao dia.



Dicas para lubrificação e conservação dos seus instrumentos

1. Limpar o instrumento externamente com álcool etílico.



2. Lubrificar o instrumento com UNIspray, acionando-o por 1 a 2 segundos. Lembre-se que o UNIspray deve estar na posição vertical e o instrumento na posição horizontal. Lubrificar sempre o instrumento conforme orientado no frasco.



Bico aplicador para encaixe Borden (com ponteira). Encaixar sempre no furo maior.



Bico aplicador para encaixe INTRA (sem ponteira).



Bico aplicador para encaixe MULTiflex (sem ponteira).



3. Uma vez ao dia, lubrificar a pinça com UNIspray, acionando-o durante 1 a 2 segundos. Utilize sempre o bico aplicador para encaixe Borden.

4. Após todos esses cuidados, os instrumentos estão prontos para serem esterilizados na autoclave.

5. Após a esterilização, retirar imediatamente o instrumento da autoclave e armazená-lo em local apropriado.

6. Antes de colocar o instrumento em uso, acoplá-lo na mangueira e acioná-lo durante alguns segundos, eliminando o possível excesso de óleo.

Importante

- Não submergir o instrumento em banho de desinfecção.
- O UNIspray vem acompanhado de 1 bico aplicador para 2 encaixes - Sistema Borden e INTRA.
- O bico aplicador para sistema MULTiflex acompanha a turbina 603 B em sua embalagem.
- Lubrificar os instrumentos, impreterivelmente, antes de cada ciclo de esterilização e a cada turno de trabalho (no mínimo 2 vezes ao dia). Antes de realizar a lubrificação, identifique o tipo de encaixe correto.

Atenção

- A garantia dos instrumentos KaVo está vinculada à correta lubrificação com UNIspray.



Fábrica

Rua Chapecó, 86 - CEP 89221-040 - Joinville - SC
Tel.: (47) 3451.0100 - Fax: (47) 3451.0214 falecom@kavo.com

Centro de inovações KaVo São Paulo
Av. Ibirapuera, 2.480 - CEP 04028-000 - São Paulo -SP
Tel.: (11) 3323.0500 - Fax: (11) 3323.0505 saopaulo@kavo.com

www.kavo.com.br



Rede de Assistência ao Cliente



KaVo. Dental Excellence.